

Vet Chroma 검사표

Reference Ver. 19.0.5

카테고리	염증			호르몬				혈전	심장	간
10종	cCRP	fSAA	cPL	Cortisol	T4	cTSH	cProgesterone	cD-dimer	cTnl	cAFP
종	개	고양이	개	개, 고양이	개, 고양이	개	개	개	개	개
채혈튜브	Heparin / EDTA 혈청	Heparin 혈청	Heparin 혈청	혈청	Heparin 혈청	Heparin / EDTA Sodium Citrate 혈청	Heparin 혈청	Heparin	Heparin 혈청	EDTA 혈청
검체타입	혈청 / 혈장	혈청 / 혈장	혈청 / 혈장	혈청	혈청 / 혈장	혈청 / 혈장	혈청 / 혈장	혈장	혈청 / 혈장	혈청 / 혈장
검체량	10 ul	10 ul	50 ul	50 ul	50 ul	200 ul	100 ul	50 ul	50 ul	50 ul
배양시간	없음	없음	없음	5분	5분	없음	없음	없음	없음	없음
검사범위	5 ~ 500 mg/L	5 ~ 500 mg/L	10 ~ 1000 ng/mL	1.09 ~ 28.96 ug/dL	0.6 ~ 7.0 ug/dL	0.1 ~ 5 ng/mL	1 ~ 25 ng/mL	50 ~ 10,000 ng/mL	0.01 ~ 15 ng/mL	5 ~ 350 ng/mL
참고치	개	-	200 ng/mL	별도 제공	별도 제공	0.6 ng/mL	2 ng/mL	250 ng/mL	0.03 ng/mL	70 ng/mL
	고양이	-	-			-	-	-	-	

검사문의 : (주)웅비애니벳 박혜란, 김민기 ☎ 02-881-5432(내선 711)

주의사항

용혈(Hematolysis), 지방이 포함된 **고지혈증 혈액**, **혈청/혈장 분리가 제대로 되어있지 않은 경우** 검사 결과에 영향을 줄 수 있습니다

혈청을 추출할 경우 반드시 **피브린 덩어리**를 제거한 후 검사를 진행하시면 보다 정확한 결과를 얻을 수 있습니다

모든 검사에서 제공해 드린 **피펫(Pipette)** 사용하면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다

혈액 샘플을 채취한 후 팁(Tip) 겉면에 혈액이 많이 묻어있다면, **겉면을 깨끗한 거즈로 닦고** 시약에 넣어 검사를 진행해 주세요

정확한 Vet Chroma 기기 작동 및 항원-항체 반응을 위하여 **최적 실내온도 23~27°C**로 유지해 주세요

모든 검사키트는 **냉장보관(2~8°C)** 해주세요